



**MEDintim**  
*your natural joy*

**Nova  
Tecnologia!**



## ACTIVE Erection System<sup>NT</sup>®

Sistema de vacío de ayuda a la erección para casos de disfunción eréctil

**NOVA TECNOLOGIA!** control electrónico, mas potencia, iluminado, resistente al agua - facil desinfección

### Utilización:

El ACTIVE Erection System<sup>NT</sup>® es un dispositivo médico destinado a lograr una erección. La bomba de vacío crea una depresión en el cilindro que rodea al pene. Esto hace que los cuerpos cavernosos se llenen de sangre, lo que provoca la erección del miembro.

A continuación se coloca uno de los anillos constrictores sobre el cuerpo del pene. El anillo evita que la sangre se retire al quitar el cilindro, lo que hace que se mantenga la erección. La erección así mantenida permite tener relaciones sexuales de forma normal y satisfactoria. Todos los componentes se guardan en la bolsa de cuero adjunta hasta el próximo uso.

El ACTIVE Erection System<sup>NT</sup>® se limpia fácilmente con agua tibia. Es posible realizar pedidos posteriores de todos los componentes, incluidos los cinco anillos constrictores de distinto tamaño, incluso después de años. El cabezal de la bomba (motor) tiene 2 años de garantía.

ACTIVE Erection System<sup>NT</sup>® es un dispositivo auxiliar reconocido por las aseguradoras médicas alemanas y puede ser recetado por el médico.

### Causas:

Los trastornos de la erección y la impotencia pueden ser causados por:

- Diabetes
- Enfermedades cardiovasculares (hipertensión arterial)
- Enfermedades de los vasos sanguíneos
- Efectos secundarios de medicamentos
- Dolencias u operaciones de la próstata
- Fenómenos relacionados con la edad
- Trastornos hormonales o psíquicos
- Abuso del alcohol
- Consumo de nicotina

### El ACTIVE Erection System<sup>NT</sup>® consta de:

- Bomba de vacío eléctrica con 3 AAA baterías
- Collarines de guía 1 y 2 para el anillo constrictor
- Cono de guía para el anillo constrictor
- 4 anillos constrictores de diferentes tamaños (diámetro interior 10 / 12,5 / 15 / 20 mm)
- Envase de lubricante SyLK de 50 ml
- Instrucciones de uso
- Bolsa de cuero para el almacenamiento

Referencia: AES NT

Made in Germany

**CE** 0483 Producto sanitario de clase IIa



Kessel GmbH  
Kelsterbacher Strasse 28  
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. +49 6105 20 37 20  
Fax +49 6105 45 59 01  
Correo electrónico: service@kessel-marketing.de

[www.medintim.de](http://www.medintim.de)