

CODAN Contrelle®



Activgard





CODAN Contrelle®



Contrelle® Activgard

presenta un planteamiento totalmente nuevo para solucionar el problema de la incontinencia de esfuerzo. La causa principal del problema es el debilitamiento del suelo pélvico, frecuentemente debido a un parto, cambios durante la menopausia u otros factores inherentes al proceso del envejecimiento. Cuando el suelo pélvico se debilita, la vejiga cae ligeramente y el ángulo del cuello de la vejiga cambia. El resultado es que la musculatura asociada ya no se puede controlar voluntariamente del todo cuando se produce un esfuerzo repentino.

La forma de Contrelle® Activgard hace que, al colocarlo en la vagina, levante la vejiga ligeramente, corrigiendo así el ángulo del cuello de la vejiga y evitando o reduciendo la pérdida de orina, incluso en caso de esfuerzo. Tan importante como esto es el hecho de que la paciente puede orinar con normalidad, sin tener que quitarse el Activgard.

Diseño y funcionamiento únicos



Contrelle® Activgard ayuda al suelo pélvico a sujetar la vejiga y a corregir el ángulo del cuello de la vejiga, lo que permite a las mujeres recuperar el control voluntario de la vejiga.

Contrelle® Activgard funciona activamente, no pasivamente. El material es blando, hecho de plástico de espuma moldeada. Al doblarlo antes de su inserción, su elasticidad provoca que se despliegue dentro de la vagina. Esto proporciona un suave soporte que levanta la vejiga al mismo tiempo que se adapta perfectamente a los movimientos del cuerpo. Las superficies exteriores del Activgard tienen una forma especial para que se ajuste bien al cuello de la vejiga y al recto. Por consiguiente, es muy importante que se coloque correctamente en la vagina, como se indica en la imagen.

Fácil de usar

Contrelle® Activgard es tan fácil de usar como un tampón. No se nota ni se ve. Si se empapa de agua antes de usarlo, el Activgard no absorbe la humedad natural de las membranas mucosas.

Contrelle® Activgard es un concepto sencillo para tratar el problema, no los síntomas.



Elasticidad natural que aporta una sujeción suave.

Visitas normales al baño

Se orina con normalidad. No es necesario quitar el Activgard. Contrelle® Activgard no comprime la uretra, sino que sujeta el cuello de la vejiga, lo que permite recuperar el control natural.

16 horas diarias como máximo, menos en algunos casos

Contrelle® Activgard se puede usar durante 16 horas al día como máximo. Debe extraerse antes de mantener relaciones sexuales y sólo debe usarse durante el embarazo después de consultarlo con el médico. Durante la menstruación debe cambiarse el Activgard cada 4 - 6 horas y se puede usar junto con otras protecciones sanitarias externas. No deben usarse tampones junto con el Activgard.

Muchas ventajas

Contrelle® Activgard es un dispositivo sencillo y eficaz para las mujeres que padecen incontinencia de esfuerzo.

De nuevo una vida normal

Al permitir que la mujer recupere el control de la vejiga, Contrelle® Activgard le permite llevar de nuevo una vida normal. Ya no tendrá que vivir con la incertidumbre de una pérdida de orina involuntaria y repentina, ni tendrá que sufrir la incomodidad de pañales absorbentes, ni preocuparse por el olor. Podrá tener una vida tan normal como la que tenía antes de padecer incontinencia.

Invisible y discreto

Contrelle® Activgard se coloca en la vagina y es tan invisible y discreto como un tampón menstrual. Se puede usar hasta 16 horas diarias sin tener que cambiarlo. Contrelle® Activgard es un producto desechable que se ha diseñado para usarlo una vez y desecharlo.



Contrelle® Activgard en el aplicador.

Contrelle® Activgard

Tres tamaños

El Contrelle® Activgard está disponible en tres tamaños y la usuaria debe experimentar un poco hasta encontrar el tamaño adecuado. Algunas mujeres experimentarán algunas molestias iniciales hasta que se acostumbren al producto, algo parecido a cuando se usan lentillas.

Ejercicios del suelo pélvico

Contrelle® Activgard no sustituye al ejercicio de los músculos del suelo pélvico, pero sirve de refuerzo de estos ejercicios y tendrá un gran valor en aquellos casos en los que los ejercicios de los músculos pélvicos no estén dando resultados.

SST

El Síndrome del Shock Tóxico (SST) aparece con muy poca frecuencia. De los pocos casos registrados, la mitad corresponden a mujeres que usan tampones. La mayoría de ellas son mujeres jóvenes que usan tampones de gran absorbencia. El Activgard es completamente no absorbente cuando se usa correctamente y se empapa de agua antes de usarlo.

Sin cambios en el pH ni en las condiciones bacteriológicas

Unos estudios realizados en Dinamarca no indican cambios en los valores del pH ni en las bacterias naturales. Tampoco indican ningún riesgo de infección vaginal o urinaria, ni irritación de las membranas mucosas.

La inserción del Activgard se puede facilitar usando una crema vaginal y las pacientes de más edad pueden beneficiarse de un tratamiento de hormonas locales.



El Activgard debe empaparse de agua antes de insertarlo.

Instrucciones breves de uso

Contrelle® Activgard es tan fácil de usar como un tampón.

- El Activgard debe empaparse de agua normal y limpia.
- Después se estira sobre el aplicador, colocando la cuerda en la ranura de la parte inferior y tirando del Activgard por encima de la parte superior redondeada.
- Después se insertan el aplicador y el Activgard en la vagina, hasta llegar a la altura de los anillos del aplicador.
- La cuerda se saca de la ranura y el aplicador se extrae de la vagina y se limpia para poder usarlo de nuevo.
- El Activgard se extrae tirando suavemente de la cuerda.

CODAN

Activgard está totalmente documentado

En 1994 se realizaron dos ensayos clínicos con Contrelle® Activgard. Uno incluía a 26 pacientes de incontinencia de esfuerzo del Hospital Glostrup, en Dinamarca. El otro incluía a 129 mujeres con incontinencia de esfuerzo en diez hospitales distintos de Suecia.

Los estudios incluían parámetros tanto subjetivos como objetivos. Las pruebas objetivas fueron pruebas de peso de pañal (24 horas) para determinar la cantidad de pérdida de orina involuntaria. En la prueba danesa, a las pacientes se les hizo un reconocimiento a fondo antes de iniciar la investigación, incluyendo cultivos vaginales, una medición del pH, evaluación de la orina residual, cultivos de orina y cronogramas de micción. Los parámetros subjetivos se evaluaron mediante cuestionarios.

Una mejora comunicada del 80%

En el estudio danés, 21 de cada 22 pacientes opinaron que Contrelle® Activgard era un producto satisfactorio o muy satisfactorio; en el estudio sueco, 66 de 90 pacientes.

Subjetivamente, el 87% de las pacientes danesas indicaron que el Activgard redujo la frecuencia de las pérdidas y un 72% comunicó una reducción de la cantidad de las fugas. Las cifras correspondientes en Suecia fueron del 77% y del 74%.

El 35% de las pacientes volvieron a ser completamente continentes

Las evaluaciones objetivas indicaron que, en Suecia, el 35% del grupo de prueba volvió a ser completamente continente y el 77% comunicó una mejora. En Dinamarca, las cifras fueron de un 36% para la continencia total y de un 64% para las mejoras.

Sin efectos secundarios apreciables

Las evaluaciones también indicaron que Contrelle® Activgard no produce indicios de cambio en los valores del pH ni en los datos bacteriológicos, no tiene riesgo de infección vaginal o urinaria ni produce irritación de las membranas mucosas.

Subjetivamente, algunas pacientes experimentaron molestias leves, en particular durante el período de aclimatación. Pero la mayoría de estas pacientes declararon que seguirían usando Contrelle® Activgard.



Contrelle® Activgard

Maat 1

REF 76.1001 Paquete de 30

Maat 2

REF 76.1002 Paquete de 30

Maat 3

REF 76.1003 Paquete de 30

Cada paquete contiene un aplicador.



CODAN en todo el mundo

CODAN es un fabricante y proveedor mundialmente conocido de sistemas de transferencia médicos de un solo uso. El grupo CODAN cuenta con 1500 colaboradores en todo el mundo.

El nombre CODAN es sinónimo de fiabilidad, calidad y precisión, cualidades que se ven respaldadas por la experiencia y los conocimientos adquiridos a lo largo de 50 años de investigación y desarrollo.

Los centros de producción propios y las empresas de comercialización en todo el mundo garantizan una producción eficaz, una densa red de distribución y un servicio de primera clase para nuestros clientes del sistema sanitario.

Gama de productos CODAN

- Equipos de perfusión
- Equipos de transfusión
- Prolongadores y conectores múltiples
- Accesorios para perfusión y transfusión
- Filtros de perfusión y sistemas de filtro
- Productos pediátricos
- Sistemas de extracción, preparación y administración
- CODAN CYTO®
- Productos Chemoprotect®
- Jeringas de un solo uso
- Sistemas invasivos de medición de la presión arterial
- Bombas de perfusión
- Productos para incontinencia
- Otros productos CODAN

CODAN Companies

CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG · BRD
CODAN pvb Critical Care GmbH · BRD
CODAN pvb Medical GmbH · BRD
CODAN PORTUGAL SA · Portugal
CODAN 11 SA · Portugal
CODAN US Corporation · California · USA
CODAN Inc. · New York · USA
CODAN NORGE A/S · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · Great Britain
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Steritex ApS · Danmark
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark

Los sistemas de gestión de calidad existentes cumplen la norma EN ISO 13485 y la Directiva europea 93/42/CEE, según informan los organismos notificados correspondientes. Ello nos autoriza a marcar nuestros productos con los siguientes distintivos:

CE 0123 TÜV Product Service para
CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG
D-23738 Lensahn

CE 0088 Lloyd's Register Quality Assurance para
CODAN Steritex ApS · DK-3060 Espergærde

CE 0543 Danish Medical Devices Certification para
CODAN Medical ApS · DK-4970 Rødby

CE 0123 TÜV Product Service para
CODAN pvb Critical Care GmbH · D-85661 Forstinning



CODAN La conexión decisiva

CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG
Stig Husted-Andersen Straße 11 · D-23738 Lensahn
Tel. +49 (0) 43 63 – 51 11 · Fax +49 (0) 43 63 – 51 12 14
www.codan.de