

# ¿Qué es tampsec™?

Tampsec es un tampón vaginal que evita las pérdidas de orina ocasionadas por la incontinencia urinaria de esfuerzo.

Se introduce dentro de la vagina elevando la pared vaginal, proporcionando a la uretra el soporte necesario para evitar la pérdida de orina.

## LOS BENEFICIOS DE TAMPSEC:

Sin Tampsec



Con Tampsec



- Tampsec evita las pérdidas de orina y todas sus consecuencias como la irritación, escaras, mal olor causado por el contacto de la orina con la piel.
- Es higiénico ya que se coloca dentro de la vagina y no está en contacto con la orina, puede llevarse hasta 12 horas seguidas y no es necesario sacárselo para orinar.
- Es cómodo de llevar ya que el material es adaptable a la anatomía de cada mujer.
- Pueden ingerir líquidos, hacer deporte, toser, reír, sin pérdida de orina.
- No estarán condicionadas para vestir, podrán llevar pantalones y vestidos ajustados y dejarán de llevar bolsos grandes para llevar toallitas, compresas, mudas...
- Vuelven a recuperar la autoestima, la seguridad, la confianza, la tranquilidad...

Tampsec está disponible en 3 tallas (Mini, Regular y Extra) – En el reverso de la página puede consultar cuál es su talla.

Tenemos disponible un Kit de tampón regular + porta tampón y cajas de 5 tampones o unidad.



Tampón regular +  
estuche porta tampones.



Tampón Tampsec mini (un)  
Tampón Tampsec regular (un)  
Tampón Tampsec extra (un)



Tampón Tampsec mini (C/5)  
Tampón Tampsec regular (C/5)  
Tampón Tampsec extra (C/5)



# Modo de uso de **tampsec**™ y cuál es tu talla

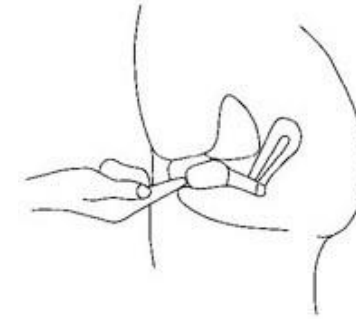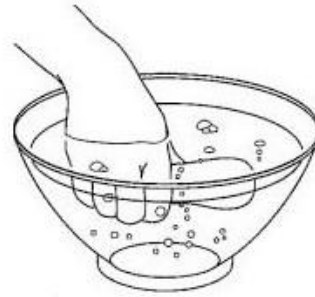

Antes de usar **Tampsec** recuerde lavarse las manos cuidadosamente.

Saque el tampón de la bolsa. Empapelo en agua tibia durante aproximadamente 1 minuto. Cuando el tampón se vuelva suave escúrralo con cuidado.

Ahora ya puede insertar **Tampsec** en la vagina del mismo modo que un tampón para la menstruación.

Empieza siempre usando la talla **REGULAR**. Es la ideal para el 85% de todas las mujeres.

Si después de usar la talla regular aún pierdes unas gotas tu talla será la **EXTRA**.

Si usando la talla **REGULAR** evitas las pérdidas pero notas la presión del tampón, tu talla será la **MINI**.

**MINI**  
**REGULAR**  
**EXTRA**

**Para facilitar la introducción** del tampón, puede utilizar una crema con estrógenos que ayudará a mantener la flora y las secreciones vaginales.

**Para facilitar la extracción** del tampón, si la vagina está seca, es conveniente inyectar agua tibia mediante una jeringa sin aguja para humedecer el tampón antes de su extracción.

